

完オゾン特浴対応・TOTO ラフィア
PHS1508#NW1

21世紀新時代の 新しい介護用浴槽が誕生

既存、塩素殺菌槽の限界を超える
オゾン殺菌（完オゾン式）の
新しい介護用機械浴槽です。

浴槽水感染防止 PL 保険対象〔三井住友海上火災保険（株）〕
公衆浴場等オゾン単独殺菌認可（22 高食衛第 654 号）



(株)エコロジーサイエンス

(地域・職域限定) プロトタイプイメージ図
実際の製品と多少異なる場合もあります。

完オゾ特浴対応 TOTO ラフィア

PHS1508#NW1

浴槽水感染防止保険対象一体型

公衆浴場等 オゾン単独殺菌（完オゾ方式）

高知県特認許可について

今般、高知県より、NPO完オゾ協議会参加企業(株)エコロジーサイエンス<完オゾ方式開発・製造（委託）・販売>へ、公衆浴場等のオゾン単独殺菌が認められました。

<高知県特認文書>22高食衛第654号
<http://www.kanozo.jp/230218B.pdf>

完オゾ方式殺菌装置でノロウイルス浴槽感染対策可能
 皮膚感染を持つ方も入浴可能。
 個人のプライバシーの尊重。



株式会社エコロジーサイエンス 御中

平成26年度

三井住友海上火災保険株式会社
 高知店 岡本圭司



生産物賠償責任保険についてのご案内

1. 保険の目的・保険の対象

完全オゾン処理型特殊浴槽（完オゾ特浴）

2. 補償内容

身体・財物共通 ・1事故・保険期間中につき1億円を限度に支払う。

3. 保険金をお支払いする損害（生産物リスク）

貴社が製造・販売した財物（生産物）が他人に引き渡された後、当該生産物の欠陥により発生した偶然な事故により、他人の生命もしくは身体を害し、または財物を滅失、き損もしくは汚損した場合に、貴社が法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害に対して、保険金をお支払いいたします。

【例】セラゾンの欠陥に起因してレジオネラ菌、ノロウイルス、多剤耐性アシネトバクター、新型スーパー耐性菌等に感染した。

4. 保険金をお支払いしない主な場合

- ① 保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任
- ② 被保険者が所有、使用または管理する財物を滅失、き損もしくは汚損した場合、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
- ③ 地震、噴火、洪水、津波などの天災に起因する損害賠償責任
- ④ 生産物または仕事の結果が、初期の効能または性能を発揮しなかったことに起因する損害。ただし、生産物または仕事の結果の機械的・電氣的またはこれらに類似の物理的かつ偶然な事故の結果として効能または性能が発揮されなかったことに起因する損害は除きます。

※上記詳細につきましては、普通保険約款・特別約款・特別条項、重要事項説明書及び商品パンフレットを必ずご確認ください。

以上

(目的)

1. 浴槽感染防止

レジオネラ菌、ノロウイルス、多剤耐性アシネトバクター等

2. 節水効果

介護浴槽、循環使用可能(15人以上/1日可能)

3. 完オゾ殺菌水

0.03ppm<平均/オゾン調整0.1ppm使用（検知器使用）メールコンサル>

(使用方法)

- 1. 浴槽湯張り<約20分>喫水線以上の確認。
- 2. オゾン装置の開始<約2分でオゾン循環>
- 3. 午前中5人~7人
- 4. 昼食休憩
- 5. 午後3人~5人
- 7. 午後3時~<完オゾ殺菌水生成>浴室・廊下・居室等清掃用に使用。
 <約5分以上になるとオゾンO₃が酸素O₂へ変化する為効果半減>

■完オゾ特浴 TOTO ラフィア 仕様

■ 外形寸法	1500mm×750mm×550mm
■ 内径寸法	1365mm×630mm×450mm
■ 浴槽容量	満水265ℓ
■ 本体重量	25kg

■完オゾ特浴 CZ 仕様

■ 循環ポンプ	自吸式 100V 150W
■ オゾン発生器	オゾン発生量 1g/h以下
■ 空転防止装置	空転スイッチ
■ 温度調節ヒーター	AC100V 50Hz/60Hz 1kW
■ 外形寸法	560mm×625mm×900mm

※上記仕様及び外観は、改良のため変更することがありますので、ご了承下さい。仕様改訂2011.04.20

【問合せ先】

渡辺パイプ株式会社 高知サービスセンター
 〒781-8121 高知県高知市葛島 4-1-20
 TEL 088-883-6321 FAX 088-883-6335
<http://www.sedia-system.co.jp>
 E-mail m_myoujin@sedia-system.co.jp



ECOLOGY SCIENCE
 株式会社 エコロジーサイエンス

〒780-0833 高知県高知市南はりまや町2-5-19
 TEL088-885-0670 FAX088-883-6653
<http://www.terao-kochi.co.jp/>
 E-mail info@terao-kochi.co.jp